

## Drill Plus

Dezinfekční a čisticí prostředek pro rotační nástroje

### Návod k použití

#### Typ přípravku

DENTACLEAN Drill Plus je samočinně čistící a dezinfekční prostředek pro přesné rotační nástroje na bázi zásad, alkoholu, a aminů. Obsahuje speciální rozpouštědla a inhibitory koroze k ochraně materiálu.

#### Oblast použití

DENTACLEAN Drill Plus se používá k dezinfekci zubních vrtaček a přesných rotačních nástrojů.

#### Mikrobiologie

DENTACLEAN Drill Plus působí proti bakteriím, kvasinkám (Candida albicans), TBC (mykobaktericidní) a virům (HIV, HCV, HBV, chřipkové viry atd.)

#### Aplikace

Drobné rotační nástroje se okamžitě po použití vloží bez předchozího čištění do nezředěného roztoku do frezátoru nebo ultrazvukové lázně. Nenechte nečistoty zaschnout. Po vyjmutí z roztoku DENTACLEAN Drill Plus nástroje pečlivě opláchněte čistou vodou a osušte. V případě hodně silného znečištění nástroje po vyjmutí očistěte kartáčkem a dezinfekci přípravkem DENTACLEAN Drill Plus zopakujte. Pokud se nástroje po dezinfekci přípravkem DENTACLEAN Drill Plus ještě sterilizují, musí se před sterilizací opláchnout a osušit. Použitý roztok každodenně obnovujte, abyste dosáhli optimální účinnosti.

#### POZOR:

**Do přípravku DENTACLEAN Drill Plus nevkładějte žádné kovové díly. Nesmíchávejte DENTACLEAN Drill Plus s žádnými jinými čisticími prostředky.**

#### Zvláštní upozornění a pokyny pro skladování

Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní list a informaci o výrobku. Zajistěte dobré větrání místnosti, hlavně u podlahy (páry jsou těžší než vzduch). Zamezte tvorbě aerosolu. Nevdechujte páry/aerosol. Dbejte na dodržení nejvyšší přípustné koncentrace na pracovišti (NPK-P) a dalších limitních hodnot. Vyhněte se styku s očima a pokožkou. Buďte opatrní při otvírání a manipulaci s nádobami. Nevylívejte a nerozstříkujte přípravek v uzavřených prostorách. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením. Držte odděleně od zdrojů zapálení – nekuřte. Páry mohou se vzduchem vytvořit výbušnou směs. Ve vyprázdněné nádobě se mohou tvořit zápalné směsi. Učiňte opatření proti elektrostatickému výboji. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavá tělesa. Dodržujte předpisy o skladování hořlavých kapalin. Dodržujte ustanovení vodního zákona. Uchovávejte odděleně od oxidačních činidel. Nádobu skladujte na dobře větraném místě. Skladujte v uzavřených nádobách na chladném a suchém místě.

#### Aplikační koncentrace / doba působení u koncentrátu

baktericidní, vysoká zátěž: 1 min  
levurocidní, vysoká zátěž: 1 min  
limitovaně virucidní: 1 min  
TBC, Mycobacterium terrae, vysoká zátěž: 5 min

#### Balení a dodací jednotky

Jednotlivé balení	Dodací jednotka
2 litrová láhev	10 × 2 l (karton)
5 litrový kanistr	1 × 5 l
10 litrový kanistr	1 × 10 l

#### Pomůcky pro správné dávkování

dávkovací pumpička pro 5 a 10 litrový kanistr  
výpustní kohout pro 5 a 10 litrový kanistr  
litrová dávkovací láhev

#### Výrobce

L.C. Pliwa, Pliwastr. 2, 343 23 Malsfeld-Ostheim, Německo

#### Složení výrobku

ve 100 g aplikačního roztoku je obsaženo:  
N,N-Bis(3-Aminopropyl)-dodecylamin 2,10 g  
tetraboritan sodný dekahydrát 1,12 g  
propan-2-ol 15,0 g  
hydroxid draselný 2,97 g  
inhibitory koroze

#### Fyzikálně-chemické údaje

vzhled koncentrátu:	čirá, bezbarvá kapalina
hodnota pH:	> 13
hustota (20 °C):	1,02 (± 0,01)

#### Osobní ochrana

Noste vždy ochranný oděv, ochranu očí, roušku a rukavice. Nechráněné osoby se musí držet v dostatečné vzdálenosti. Postarejte se o dostatečné větrání. Vyhněte se styku s pokožkou a očima. Nevdechujte páry. Držte odděleně od zápalných zdrojů. Plyny, páry, mlhu zlikvidujte postříkáním vodou. Nenechte vniknout do kanalizace nebo povrchových a spodních vod.

#### Označení

C € 0124 / Třída IIb / UMDNS 17-920 / UN 2924

#### Informace k ochraně životního prostředí

Vyrobeno moderními, bezpečnými a ekologicky šetrnými postupy, hospodárně a s dodržением vysokých standardů kvality (EN ISO 9001, EN ISO 13485). Biologická odbouratelnost prokázána odborným posudkem přispívá k tomu, že odpadní vody i životní prostředí jsou při odstranění použitých výrobků podstatně méně zatíženy.

#### Údaje k ekologii

Biologická odbouratelnost: snadno biologicky odbouratelný  
Metoda: OECD 301D / EEC 84/449 C6

#### Certifikát

na seznamu VAH

#### Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008

##### Nebezpečí

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P260 Nevdechujte páry / aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochr. oděv / ochr. brýle / obličejový štít.

P301+P330+P331 **Při požití:** Vypláchněte ústa. **Nevyvolávejte zvracení.**

P303+P361+P353 **Při styku s kůží nebo s vlasy:**

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 **Při zasažení očí:** Několik minut opatrně oplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P304+P340 **Při vdechnutí:** Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P309+P310 Při expozici nebo necítíte-li se dobře, Volejte toxikologické informační středisko +420 224 919 293 / lékaře.

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje hydroxid draselný.

