

DENTACLEAN Tray

Čistící koncentrát na otiskovací lžice bez obsahu aldehydů

Oblast použití:

účinný koncentrát na čištění otiskovacích lžic. Rozpouští zbytky alginátu, cementu a adhesivních laků. Dentaclean TRAY je určen pro všechny nerezavějící kovy a umělé hmoty.

Použití:

Lžici zhruba očistěte od ulpělého materiálu a pokud možno přes noc ji vložte do roztoku. Zbytky materiálu snadno odstraníte pod tekoucí vodou nebo kartáčkem. Roztok po 3-4 dnech podle stupně znečištění znovu obnovte.

Dávkování:

5-10% (cca. 50-100 ml na 1 litr vody). Teplá voda čistící proces urychlí.

Složení:

Propan-2-ol, Alkoholethoxylat,
Laurethsulfát sodný, 1,2-Propandiol, kyselina glykolová,
1,2,3 - Benzotriazol 0,1%

Označení v souladu s nařízením (ES) Nr.1272/2008:



NEBEZPEČÍ

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H315 Dráždí kůži

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel.224 919 293 nebo lékaře

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody

P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: Alkan (C13-C17) sulfonát sodný; 15-30% aniontových povrchově aktivních látek.

Před použitím čtěte veškeré pokyny k použití a bezpečnostní list.