

STERI.IRRIGATION TIPS - irigační hroty



* VLASTNOSTI:

- Bezpečné jednorázové endodontické a parodontologické irigační hroty.
- Unikátní design s postranním otvorem pro prvotřídní účinnost a pohodlí pacienta při irigaci kořenových kanálků a parodontálních chobotů.
- Předem sterilizovány plyným etylenoxidem.
- Použití se stříkačkami vybavenými systémem Lue
- Hroty s postranním otvorem a uzavřeným koncem.



* POKYNY:

1. Otočte a dobře upevněte hrot Canal Clean na stříkačce vybavené systémem
2. Stříkačku naplňte irigačním roztokem.
3. Odstraňte ze stříkačky ochranné víčko.
4. Pohybem nahoru a dolů propláchněte celý preparovaný kořenový kanálek.
5. Zcela vyčistěte gingivální sulkus, aniž by došlo k poškození tkání.
6. Snižte riziko poškození tkání efektivní irigací chobotů pomocí uzavřeného a oblého hrotu.

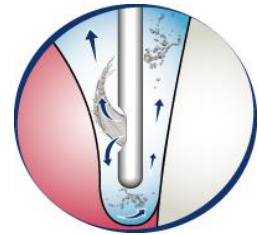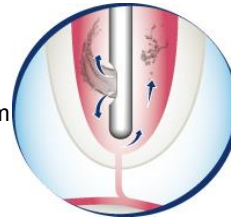

Zaručujeme, že výše uvedené informace jsou pravdivé a správné.

DIADENT GROUP INTERNATIONAL

RICHARD. J YOU/ C.E.O